

### **3-slojna obrazna higijenska maska za enkratno uporabo** (ne-medicinska).

Higijenska maska za enkratno uporabo služi kot pomoč pri varovanju okolice pred kapljicami sline uporabnika, s čimer se lahko prepreči, da bi te kapljice dosegle druge osebe oziroma predmete v bližini.

Ta maska ni opredeljena kot osebna varovalna oprema po uredbi (EU) 2016/425 in ni medicinski pripomoček po Direktivi 93/42/ES ali Uredbi (EU) 2017/745.

Velikost: 14,2cm x 9,0cm

Sestava: netkani material, filter, elastika.

#### **Navodila za uporabo / pravilna namestitev obrazne maske za enkratno uporabo** (slike na embalaži):

- 1.)** Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali si jih razkužimo.
- 2.)** Masko obrnemo tako, da je vgrajena kovinska žička na vrhu. Pri barvni maski pazimo, da je bela stran obrnjenena navznoter.
- 3.)** Zanke zataknemo za ušesa, vgrajeno kovinsko žico pa pritisnemo ob nos, da se maska tesno prileže obrazu.
- 4.)** Masko držimo na nosu, njen spodnji del potegnemo čez brado.

**Maska je namenjena ENKRATNI uporabi. ZAMENJATI jo je treba po DVEH URAH oziroma POGOSTEJE če je VLAŽNA. Pravilno nameščena maska mora pokrivati USTA, NOS in BRADO.**

Država porekla: Kitajska • Leto uvoza: 2020 • Uporabno do: 08/2022